



RH 112 - Reanimationshilfe




visual
feedback

Visuelles Feedback durch farbige LED's zur
Einhaltung des optimalen Kompressionsdrucks




acoustic
signal

Akustisches Signal zur Vorgabe der optimalen
Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen/Minute

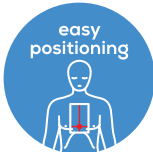

easy
positioning

Einfache Positionierung dank Anleitung und
Markierung direkt auf dem Pad

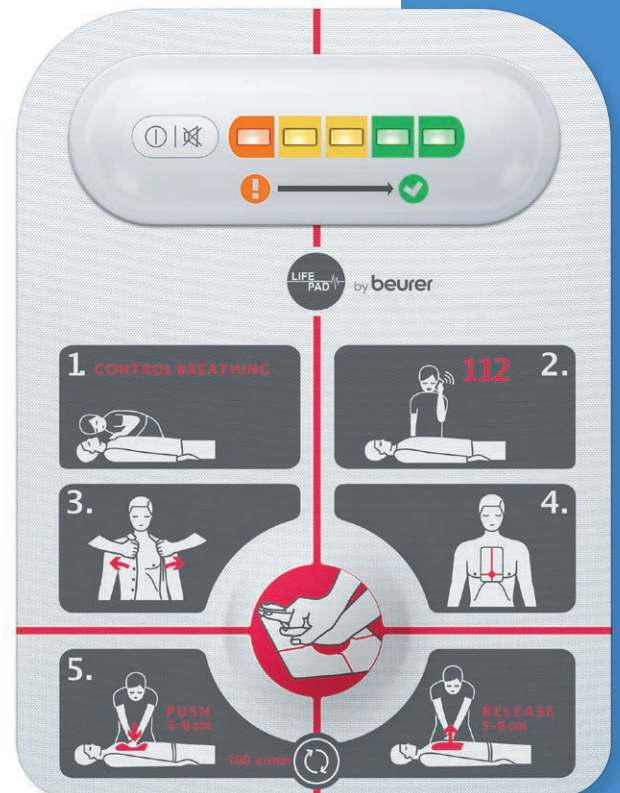

Portabel und gut verstaubar durch kompakte Größe und flexibles
Material

Auflagefläche für die Hände hilft bei der korrekten Positionierung

Passt sich der Körperform an

Kann in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden
(Ton abschaltbar)

Patenterte Technologie*

Zur Anwendung an und von Personen ab 12 Jahren

Spritzwassergeschützt nach IP 44

Einmalprodukt

Inkl. 1 x CR2032 Batterie

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 215 x 160 x 5 mm

Produktgewicht: ca. 135 g

5 Jahre Garantie

PZN: 16792204

VE: 3 / Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125 65302 6

Art.-Nr.: 653.02




Erste Hilfe - sicher und schnell

LifePad® - Dein Helfer im Notfall

Die meisten Herzstillstände passieren zu Hause. Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert.

Das LifePad® leitet Sie bei der Reanimation und hilft Ihnen, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.

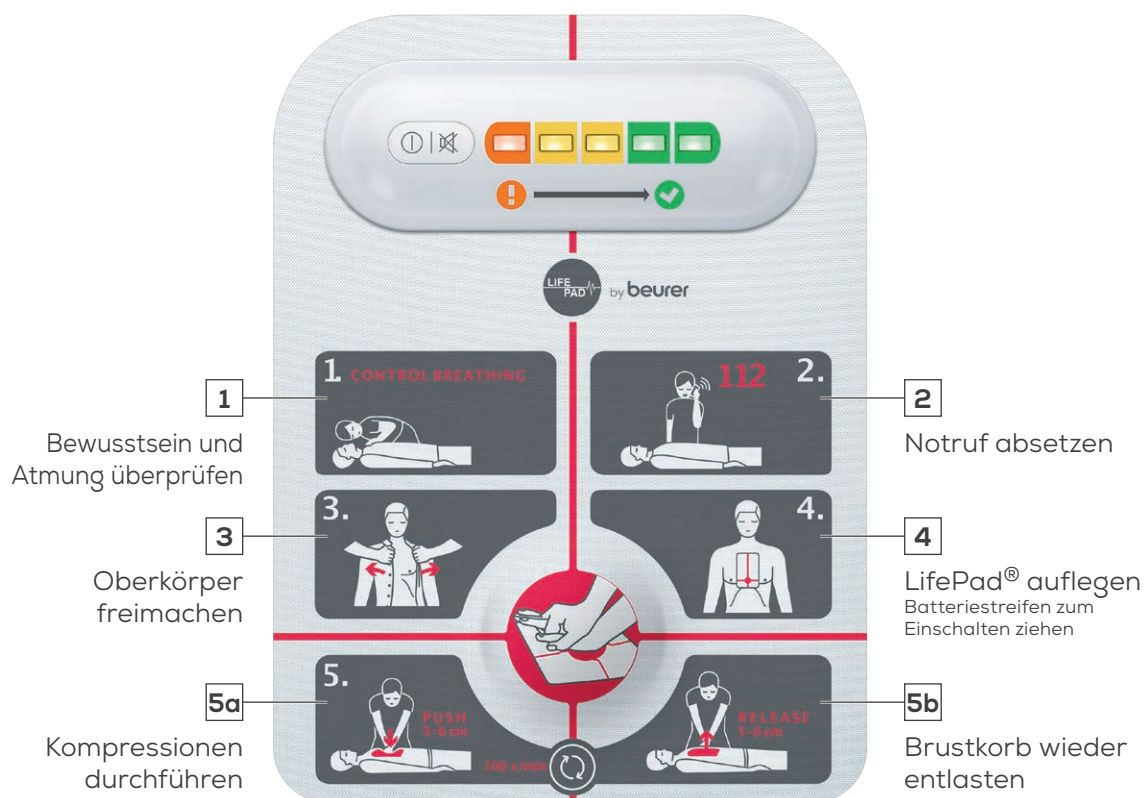

Schritt **5a** und **5b** im Rhythmus des Signaltons wiederholen, um eine Frequenz von 100 Kompressionen pro Minute zu gewährleisten.

Die Herzdruckmassage wird durchgeführt, bis wieder deutliche Lebenszeichen wahrnehmbar sind oder der Notarzt übernimmt.